

Theme: "AED"について

## ～AED ボックスのサイレンについて～

AED ボックスを開けるとサイレンが鳴ります。周りに緊急事態を知らせるためと盗難防止のためです。

使用時にサイレンを止めるには？

ボックス内上部(赤丸)のスイッチを OFF にします。



## ～AED の使い方、大丈夫ですか？～

### 1 フタを開ける




### 2 電極パッドを貼る



電極パッドを貼る  
解析が始まります

### 3 ショックボタンを押す

電気ショックが必要な心電図と判断すると、エネルギーの充電後ショックボタンが点滅します

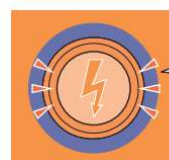

体から離れてください。  
点滅ボタンをしっかりと  
押してください。

## ～使用後の注意！～

使用後のパッドを貼り合わせて扉を閉めても

音声ガイダンスは鳴りやみません。

使用後は予備のパッドと交換するか本体からパッドの  
コネクターを抜いて扉を閉めてください。



## ～使用後は？～

使用後は、消耗品の補充、点検のため CE までご連絡ください。

※月～土 8:30～17:05 TEL 6120 or 6181


## ～Q&A こんな時はどうしたらいいですか？～

### Q1、子供に使用する時は？

A1、小児モードがあり未就学児が対象です。



成人、小児切替スイッチを小児側へ切り替えて使用します。

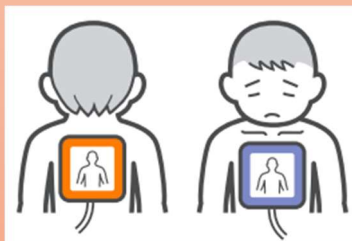

体が小さい場合は、胸の真ん中と背中に貼ります。

※JRC(日本版)ガイドライン2010より1歳未満の乳児に対してもAEDを使用できるようになりました。

### Q2、ペースメーカーが入ってる時はどうするの？

A2、鎖骨下が膨んでいる場合はペースメーカーが入っている可能性があります。

膨らみから8cm以上離して電極パッドを貼ってください。(ただし、電極パッドを貼る位置に迷って、救命が遅れることがないようにしてください。)

## ～意識のない人に遭遇したら～

日本では7分に1人が心臓突然死で亡くなっています。その原因の多くがAEDの有効な「心室細動」です。電気ショックが1分遅れると救命率が10%ずつ低下します。119番通報をしてから救急車が到着するまでの平均時間は札幌市平均6.9分。病院の周りにも多くのAEDがあります。

もし倒れている人に遭遇し「心停止かどうかわからない」といった時にも勇気をもって119番通報と胸骨圧迫を実施し、AEDを要請します。心臓が止まっていない方に胸骨圧迫を実施しても、大きな合併症はありません。胸骨圧迫をいやがる動作がみられたら、中止してください。

女性へのAEDの使用をためらう報告があります。

服を脱がさず下着をずらしてパッドを貼ることが出来ます。

その際、「ブラジャーのワイヤー部分、ネックレスなどは、パッドに触れないようにずらします。また、パッドを貼った後に服をかけることで倒れた女性に配慮することが出来ます。

(公益財団法人日本AED財団から引用)



札幌駅周辺



←AED



左のQRコードで東京消防庁の応急処置動画が視聴可能です。  
※視聴には通信料がかかります

発行責任者：浦崎 伸吾